

DOSI-FUSER®

L'UTILISATION RÉUSSIE du DOSI-FUSER® repose sur une sensibilisation efficace des patients. Aidez votre patient à vivre une expérience simple, sûre et confortable.




Vérification, connexion et déconnexion

Points clés à retenir pour les soins infirmiers




VÉRIFICATION

- Assurez-vous que le dispositif d'accès vasculaire est entièrement perméable, conformément au protocole de rinçage de l'établissement, avant de connecter le DOSI-FUSER.
- Vérifiez l'étiquette du patient conformément au protocole de l'établissement.

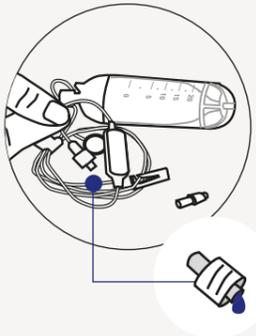


CONNEXION

- Retirez le bouchon de la ligne de perfusion et assurez-vous que la ligne est amorcée et exempte d'air.
- Connectez le dispositif au patient.

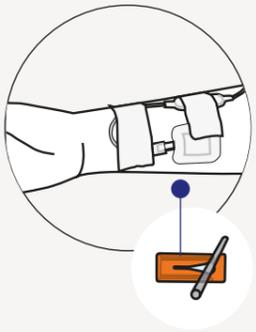

- Déclamez la ligne de perfusion.
- Fixez le dispositif capillaire sur la peau du patient.

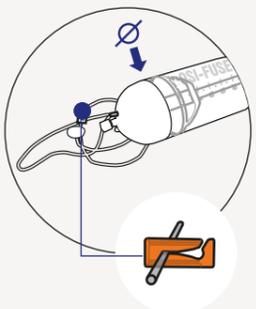


DÉCONNEXION

- Clampez la ligne de perfusion et déconnectez-la du patient.
- Éliminez le diffuseur conformément au protocole de l'établissement.

Personnel infirmier: Le DOSI-FUSER® est un diffuseur à perfusion continue élastomérique à usage unique. Il offre une expérience de perfusion à domicile plus confortable.


La sensibilisation des patients est importante!

Points clés que votre patient doit connaître

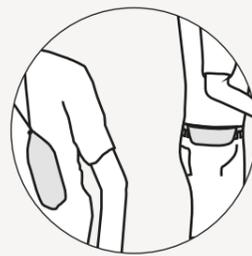


COMMENT LE DISPOSITIF DOIT-IL ÊTRE PORTÉ ?

Le DOSI-FUSER doit être porté entre l'aisselle et la taille. Au lit, n'importe où au même niveau que le patient.

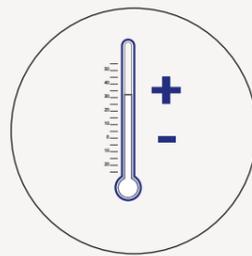


QU'EST-CE QUI PERMET DE MAINTENIR UN DÉBIT DE PERFUSION RÉGULIER ?

Le dispositif capillaire régulateur de débit doit être fixé directement sur la peau et le diffuseur maintenu à température ambiante. Évitez d'exposer le diffuseur à des températures extrêmes, à des couvertures chauffantes, à la lumière du soleil ou à des environnements extrêmement froids.

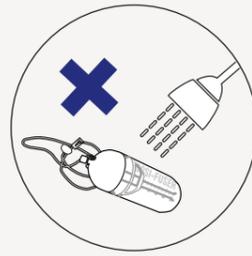


COMMENT UTILISER LE DISPOSITIF DANS LE BAIN/SOUS LA DOUCHE ?

Protégez le diffuseur des sources d'eau directes. Évitez en toute circonstance de mouiller le filtre.

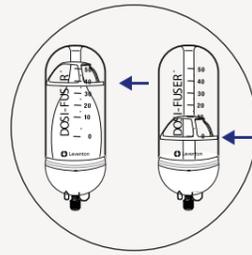

COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI LA PERFUSION EST TERMINÉE ?

L'indicateur de niveau en plastique blanc à l'intérieur du diffuseur descend progressivement sur la graduation bleue à mesure que le ballonnet se vide. La perfusion est terminée lorsque l'indicateur est à zéro.

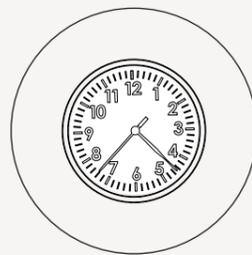

QUE FAIRE SI LA PERFUSION SE TERMINE PLUS TÔT OU PLUS TARD QUE PRÉVU ?

Ce type de diffuseur peut entraîner une variation de 10 % en moins ou en plus du temps de perfusion.

Expliquez au patient ce que cela signifie en prenant pour exemple le nombre d'heures correspondant à son temps de perfusion.

