

# DOSI-FUSER®

A UTILIZAÇÃO BEM-SUCEDIDA do DOSI-FUSER® depende de ensinar eficazmente o paciente. Ajude o seu paciente a ter uma experiência segura, confortável e sem problemas.




## Verificação, ligação e desconexão

Pontos principais de enfermagem a ter em mente




### VERIFICAÇÃO

- Garanta a total desobstrução do dispositivo de acesso vascular, irrigando-o de acordo com o protocolo da instituição antes de ligar o DOSI-FUSER.
- Verifique a etiqueta do paciente segundo protocolo da instituição.

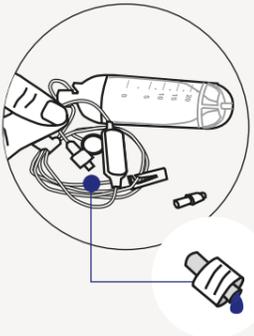


### LIGAÇÃO

- Retire a tampa da linha de infusão, certifique-se de que a linha está purgada e isenta de ar.
- Ligue-a ao paciente.

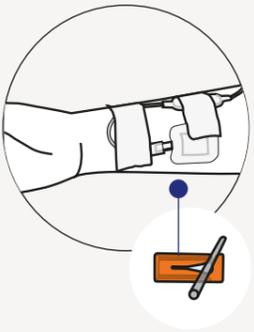

- Desbloqueie a linha de infusão.
- Prenda o dispositivo capilar à pele do paciente.

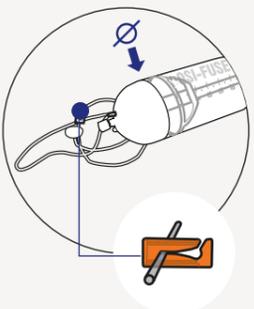

### DESCONEXÃO

- Bloqueie a linha de infusão e desligue-a do paciente.
- Elimine o infusor de acordo com o protocolo da instituição.

**Pessoal de enfermagem:** o DOSI-FUSER® é uma bomba de infusão contínua elastomérica de utilização única. Proporciona uma experiência mais confortável de infusão em casa.


## A instrução dos pacientes é importante!

Pontos principais que o seu paciente tem de saber




### ONDE SE USA?

O DOSI-FUSER deve ser colocado entre a axila e a cintura. Na cama, em qualquer lugar ao nível do paciente.

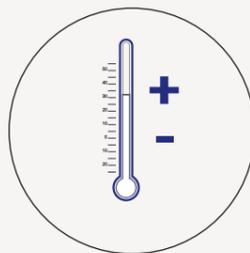


### O QUE MANTÉM A VELOCIDADE DE INFUSÃO CONSTANTE?

O dispositivo capilar restritor: tem de estar colocado diretamente na pele, mantendo a bomba o mais próximo possível da temperatura ambiente. **Evite expor a bomba a temperaturas extremas**, não utilize cobertores elétricos e mantenha afastada da luz solar/ambientes extremamente frios.

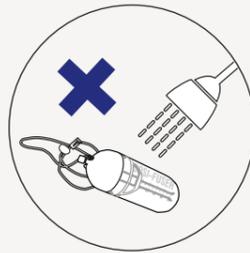


### TOMAR BANHO/DUCHE?

Proteja a bomba de jatos de água diretos. Evite que o filtro se molhe em todas as circunstâncias.

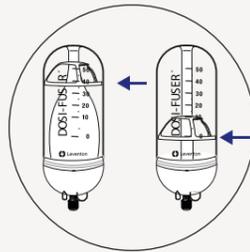

### COMO É QUE SEI SE ESTÁ A INFUNDIR OU SE JÁ TERMINOU?

O indicador de nível de plástico branco dentro da bomba vai descendo gradualmente ao longo da escala graduada azul, à medida que o balão se esvazia. A infusão está terminada quando o indicador de nível branco chega ao zero.

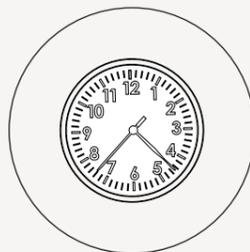

### E SE TERMINAR MAIS CEDO OU MAIS TARDE DO QUE O PREVISTO?

Este tipo de bomba pode terminar com até 10% de variância em termos de tempo de infusão, **mais cedo ou mais tarde**. Explique ao paciente o que isto significa com o **número de horas** do seu tempo de infusão pessoal.

