

DOSI-FUSER[®]

Pompe à Perfusion Élastomère Portable

*Coque rigide, pré-calibrée et
conçue pour une perfusion de
chimiothérapie facile et sûre.*



leventon
a werfen company

SITE DE REMPLISSAGE LUER-LOCK

- Entrée directe dans le ballonnet pour une dilution optimale du médicament
- Valve anti-retour de sécurité et bouchon de fermeture

BALLONNET EN POLYISOPRÈNE ÉLASTOMÉRIQUE

- Ballonnet guidé conçu pour un remplissage facile
- Meilleure performance mécanique pour un débit stable
- Compatibilité démontrée avec les médicaments. Tableau de stabilité médicamenteuse disponible sur demande

ÉTIQUETTE DE PRODUIT SIMPLE

- Étiquette avec code de couleur et de forme en fonction de la taille et de la durée
- Étiquette identique sur le produit, le sachet et la boîte

POINT DE SORTIE INDÉPENDANT À LA LIGNE DE PERFUSION

ÉTIQUETTE DE TRAÇABILITÉ DU PRODUIT

- Code du produit et numéro de lot

CLAMP COULISSANT AMOVIBLE


- Permet au clinicien de contrôler le début et l'arrêt de la perfusion

LIGNE DE PERFUSION

- PVC sans DEHP anti-plicatures

CONNECTEUR LUER-LOCK DISTAL

- Connecteur confortable pour le patient
- Avec bouchon de sécurité

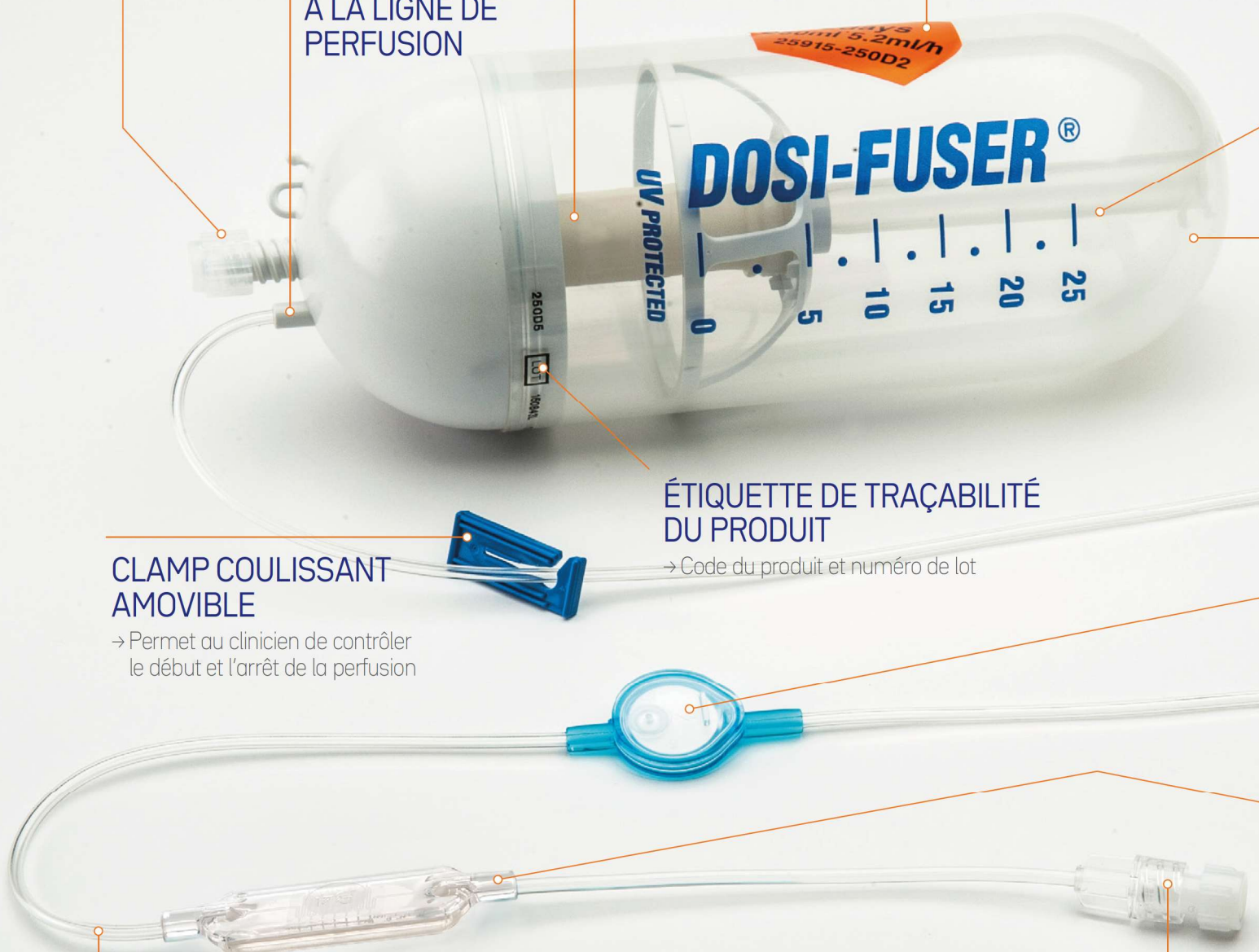



INDICATEUR SIMPLE AVEC GRADUATION

Surveillance fiable
de la progression
de la perfusion.

FILTRE SUR LA LIGNE

Membrane d'évacuation
de l'air.

Membrane
anti-particules.



COQUE RIGIDE

- Protège le ballonnet des pressions extérieures
- Opaque aux UV pour les médicaments photosensibles



DISPOSITIF CAPILLAIRE UNIQUE BREVETÉ

Canal plus large pour éviter
les obturations.

Le canal plus long améliore la
stabilité du flux de sortie.

Conception plate pour une
stabilité thermique optimale
sur la peau.

DOSI-FUSER® est un diffuseur portable continu à usage unique pour les patients ambulatoires qui fonctionne sans piles ni électricité.

1 Applications principales

Chimiothérapie
Antibiothérapie
Traitement de la douleur*


*Gamme spécifique

2 Voies d'administration

Intraveineuse
Intra-artérielle
Épidurale
Sous-cutanée

3 Détails de la perfusion

Précision à $\pm 15\%$ du temps de perfusion. Précision de fonctionnement de $\pm 10\%$
Sur le graphique ci-dessous, nous observons le débit régulier qui fait la spécificité du dispositif du fait des caractéristiques élastomères et géométriques du ballonnet.

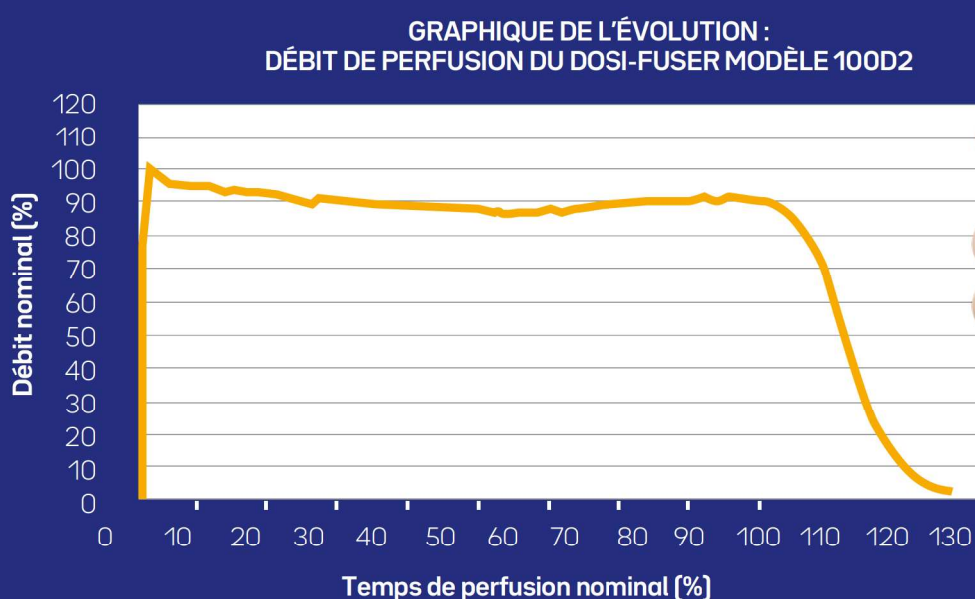

Spécifications techniques

Capacité nominale	65 ml	100 ml	150 ml	250 ml	400 ml	500 ml	600 ml
Volume maximum	80 ml	130 ml	180 ml	300 ml	420 ml	525 ml	650 ml
Volume minimum	39 ml	60 ml	90 ml	150 ml	240 ml	300 ml	360 ml
Volume résiduel	< 2.5 ml	< 3.5 ml	< 4 ml	< 5 ml	< 7 ml	< 7 ml	< 7 ml
Longueur de la ligne de perfusion	1 m						
Taille des pores du filtre à particules	1.2 μm						
Taille des pores du filtre à air	0.02 μm						
Matériaux du réservoir	PP, ABS, polyisoprène (sans latex), silicone						
Matériaux de la ligne de perfusion	PVC sans DEHP, acrylique, polyéthersulfone, TPE, MABS						

Le **volume maximal** correspond à la quantité maximale de liquide pouvant être introduite dans le réservoir en toute sécurité.

Le **volume minimal** correspond au volume minimal recommandé (60 % du volume nominal).

Le **volume résiduel** est le volume restant dans la pompe et la tubulure à la fin de la perfusion.

DOSI-FUSER®



DOSI-FUSER® MULTIPACK DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

- Réduit le gaspillage de matériaux d'emballage.
- Efficacité de la boîte en réduisant le poids et le volume.
- Moins de sachets à désinfecter, seulement deux surfaces par sachet.
- Moins de travail pour déballer chaque pompe.
- Toutes les pompes sont regroupées par un filet.




SACOCES

- Légères et confortables pour le patient.
- Modèle pédiatrique spécialement conçu pour les enfants.
- Petits, moyens et grands modèles pour toutes les tailles de réservoirs.
- Convient à différentes tailles de ceinture, extension supplémentaire disponible.
- Absence de pièces métalliques. Matière textile résistante.



DOSI-FILLER®

- Solution mécanique pour un remplissage plus facile et plus rapide du DOSI-FUSER®.
- Réduit la fatigue: Le système de levier permet de pousser et de tirer une seringue plus doucement que manuellement.

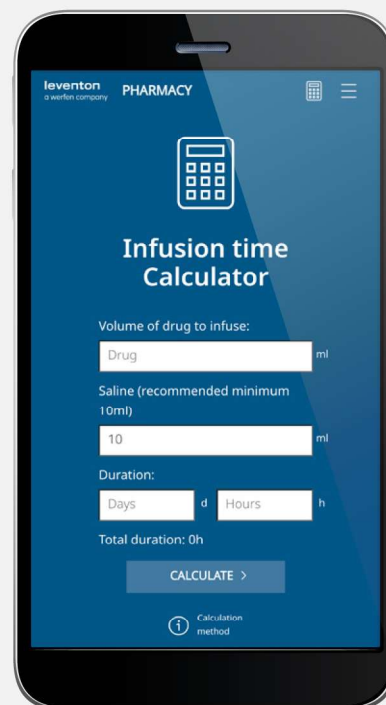

DOSI-FUSER®

Téléchargez notre
application gratuite!

Caractéristiques

Sections spécifiques

Inclut le contenu pour chaque type d'utilisateur: pharmaciens, infirmerie et patients.

Calculateur de temps de perfusion

Excellent outil qui montre facilement les modèles DOSI-FUSER® correspondants à la prescription du pharmacien et suggère le volume de remplissage.

Outils de formation

Support multimédia montrant comment utiliser le DOSI-FUSER®

Disponible en anglais, espagnol, français et portugais.



dosi-fuser.com



		65ml	100ml	150ml	250ml			
Perfusion Continue Longue Durée	7 jours		7days 100ml 0.6ml/h 100D7	7days 150ml 0.9ml/h 150D7	7days 250ml 1.5ml/h 250D7	DOSI-FUSER® High Volume 400ml 500ml 600ml		
	5 jours	5days 65ml 0.5ml/h 065D5	5days 100ml 0.8ml/h 100D5	5days 150ml 1.2ml/h 150D5	5days 250ml 2.1ml/h 250D5			
	3 jours	3days 65ml 0.9ml/h 065D3	3days 100ml 1.4ml/h 100D3	3days 150ml 2.1ml/h 150D3	3days 250ml 3.5ml/h 250D3			
	2 jours	2days 65ml 1.3ml/h 065D2	2days 100ml 2.0ml/h 100D2	2days 150ml 3.1ml/h 150D2	2days 250ml 5.2ml/h 250D2	2days 400ml 8.3ml/h 400D2	2days 500ml 10.4ml/h 500D2	2days 600ml 12.5ml/h 600D2
	1 jours	1day 65ml 2.7ml/h 065D1	1day 100ml 4.1ml/h 100D1	1day 150ml 6.2ml/h 150D1	1day 250ml 10.4ml/h 250D1		1day 500ml 20.8ml/h 500D1	1day 600ml 25ml/h 600D1
Perfusion Continue Courte Durée	12 heures	12hours 65ml 5.4ml/h 065H12	12hours 100ml 8.3ml/h 100H12	12hours 150ml 12ml/h 150H12	12hours 250ml 20ml/h 250H12		12hours 500ml 41.6ml/h 500H12	12hours 600ml 50ml/h 600H12
	5 heures	5hours 65ml 3.2ml/h 065H5	5hours 100ml 20ml/h 100H5	5hours 150ml 30ml/h 150H5	5hours 250ml 50ml/h 250H5	4hours 400ml 100ml/h 400H4		
	2 heures	2hours 65ml 3.2ml/h 065H2	2hours 100ml 50ml/h 100H2	2hours 150ml 75ml/h 150H2	2hours 250ml 125ml/h 250H2		2hours 500ml 250ml/h 500H2	
	1 heures	1hour 65ml 65ml/h 065H1	1hour 100ml 100ml/h 100H1	1hour 150ml 150ml/h 150H1	1hour 250ml 250ml/h 250H1	Dispositif Capillaire Tube Capillaire		
	30 min	30 min 65ml 130ml/h 065M30	30 min 100ml 200ml/h 100M30	30 min 150ml 300ml/h 150M30				

La Plus Large Gamme de
Solutions pour les Thérapies IV



Le système de gestion de la qualité de Leventon est certifié par UL LLC conformément à la norme ISO 13485:2016 et aux exigences réglementaires supplémentaires du MDSAP.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial ou distributeur Leventon local.

Fabriqué par: Leventon SAU - A Werfen Company