



# Solución de problemas


- ▶ **Si no fluye la medicación**, compruebe que la línea de infusión no esté bloqueada con el clamp y que el tubo no esté retorcido.
- ▶ **Si nota que hay líquido dentro del contenedor**, pero fuera del balón, póngase en contacto con su profesional sanitario.
- ▶ **Si se rompe alguna pieza de la bomba**, pince la línea según las instrucciones y póngase en contacto con su profesional sanitario.
- ▶ **Si se vierte líquido sobre la piel**, lávela inmediatamente con agua y póngase en contacto con su profesional sanitario.

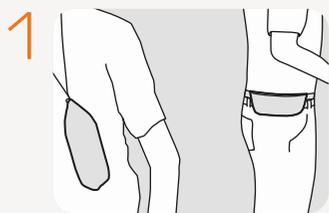


1 Lleve el contenedor junto al cuerpo.

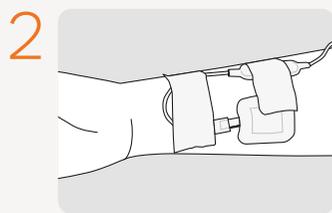

2 Mantenga el dispositivo capilar en contacto con la piel.

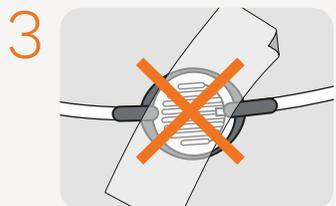

3 No cubra el filtro. Mantenga el dispositivo limpio y seco.

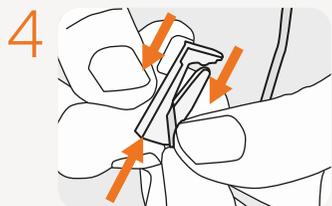

4 Para detener la infusión, pince la línea deslizando el tubo hacia la parte estrecha del clamp.

PL-L259000422x00 011-2024

**leventon**  
a werfen company



[dosi-fuser.com](http://dosi-fuser.com)

# DOSI-FUSER®

## Guía para el paciente




- ▶ El personal de enfermería iniciará la infusión y le informará de la duración prevista.
- ▶ Podrá observar cómo el balón se deshincha y se hace más pequeño a medida que la infusión avanza.
- ▶ Conforme se deshincha, verá que el indicador blanco se desplaza a lo largo de la escala.
- ▶ Al llegar a cero [0], la infusión habrá finalizado.

## Cómo funciona DOSI-FUSER®

- 1 La bomba tiene un contenedor de plástico con un balón dentro donde se encuentra la medicación que le han prescrito. La bomba debe llevarse entre la parte superior del pecho y la cintura, de acuerdo con las instrucciones de su profesional sanitario.
- 2 Va unida a una línea de infusión, un filtro y un dispositivo capilar. El dispositivo capilar indica la velocidad de infusión y debe estar sobre la piel en todo momento, según el lugar y el método que le indique el personal sanitario. La presión del balón infunde la medicación a un ritmo constante.

# DESCRIPCIONES DE CADA PIEZA

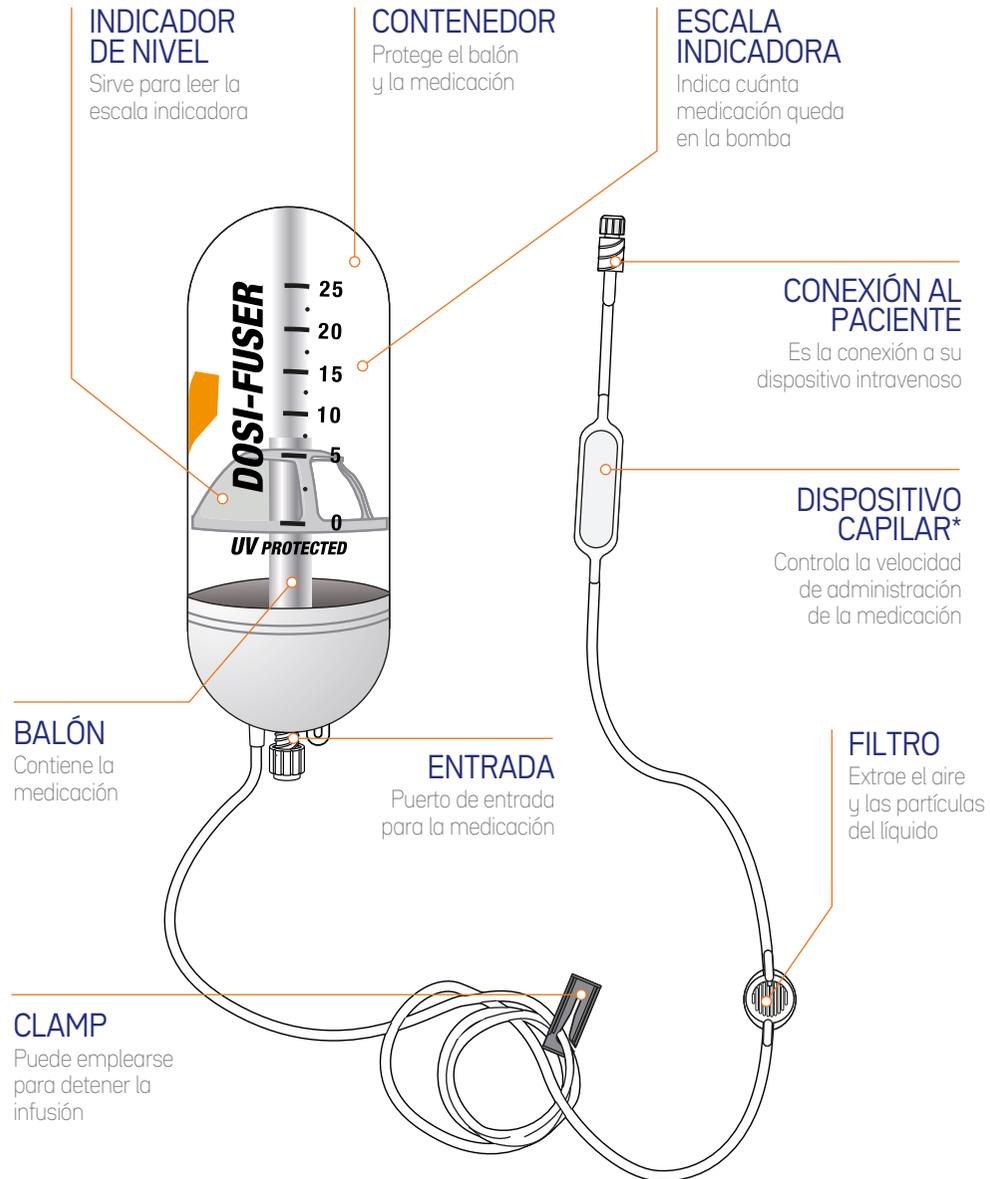

\*Algunos modelos incorporan tubo restrictor en lugar de dispositivo capilar.

# Instrucciones generales

## **Dormir**

- ▶ Coloque DOSI-FUSER® en un lugar que se encuentre al mismo nivel que usted.
- ▶ No lo cuelgue en un portasueros.
- ▶ No lo deje en el suelo.

## **Ducha/Baño**

- ▶ Si tiene que darse una ducha o un baño, proteja DOSI-FUSER® del agua.
- ▶ En concreto, asegúrese de que el orificio del filtro de la línea esté protegido del agua, ya que podría bloquear la membrana de eliminación de aire.

## **Temperatura**

- ▶ No exponga el contenedor a temperaturas extremas.
- ▶ Proteja el contenedor de temperaturas frías llevándolo debajo de la ropa.
- ▶ Protéjalo del calor directo.
- ▶ Mantenga el dispositivo capilar en contacto con la piel a 32 °C/89,6 °F.

## **Lavado**

- ▶ No es necesario lavar el dispositivo capilar, pero si lo hace, utilice solamente agua.
- ▶ No emplee alcohol ni otros disolventes para este fin.

## **Ejercicio**

- ▶ Aunque puede hacer ejercicio con DOSI-FUSER®, tenga en cuenta lo siguiente:
  - ▶ La altura del dispositivo.
  - ▶ La temperatura.
  - ▶ No humedezca el filtro de la línea.
  - ▶ No deje que el producto se caiga.

## **Viajes**

- ▶ Puede viajar en avión con DOSI-FUSER®.