



Dépannage


- ▶ **Si le médicament ne s'écoule pas**, vérifiez que la ligne de perfusion n'est pas clampée et que la tubulure n'est pas pliée.
- ▶ **Si vous remarquez la présence de liquide dans la coque**, en dehors du ballonnet, contactez votre fournisseur de soins de santé.
- ▶ **Si une partie de la pompe est endommagée**, clampez votre ligne comme indiqué et contactez votre fournisseur de soins de santé.
- ▶ **En cas de fuite de liquide sur votre peau**, rincez-vous immédiatement à l'eau et contactez votre fournisseur de soins de santé.

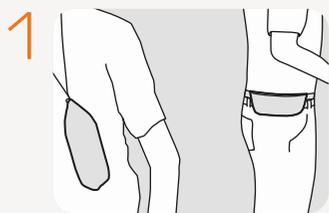


1 Portez le diffuseur près de votre corps.

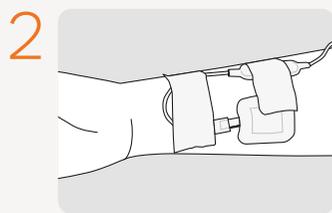

2 Gardez le dispositif capillaire en contact avec la peau.

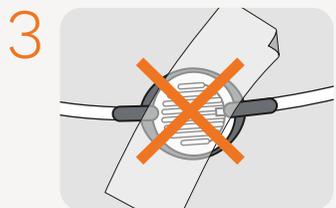

3 Ne couvrez pas le filtre. Gardez-le sec et propre.

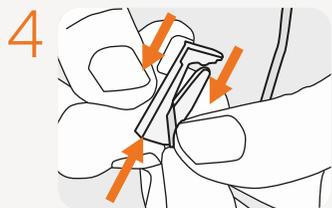

4 Pour arrêter la perfusion, clampez la ligne en faisant glisser la tubulure dans la partie étroite du clamp.

PL-259000389-1V02 01-2024



DOSI-FUSER®

Guide du patient à domicile




- ▶ *Votre infirmière commencera la perfusion et vous indiquera la durée prévue de celle-ci.*
- ▶ *Vous remarquerez que le ballonnet se dégonfle et diminue à mesure que la perfusion progresse.*
- ▶ *Vous verrez l'indicateur de niveau en plastique blanc descendre progressivement sur la graduation à mesure que le ballonnet se dégonfle.*
- ▶ *À la fin de la perfusion, l'indicateur sera à 0 (zéro).*

Comment fonctionne le DOSI-FUSER®

- 1 Le diffuseur est constitué d'une coque en plastique contenant un ballonnet qui renferme les médicaments prescrits. Le diffuseur doit être porté entre la poitrine et la taille, selon les instructions de votre fournisseur de soins de santé.
- 2 Une ligne de perfusion munie d'un clamp, d'un filtre et d'un dispositif capillaire insérés dans la tubulure est fixée au patient. Le dispositif capillaire contrôle le débit de perfusion et doit être attaché à votre peau en permanence, à l'emplacement et selon les instructions de votre infirmier(e). La pression du ballonnet rempli à l'intérieur du diffuseur perfuse le médicament à un débit constant.

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE LA POMPE

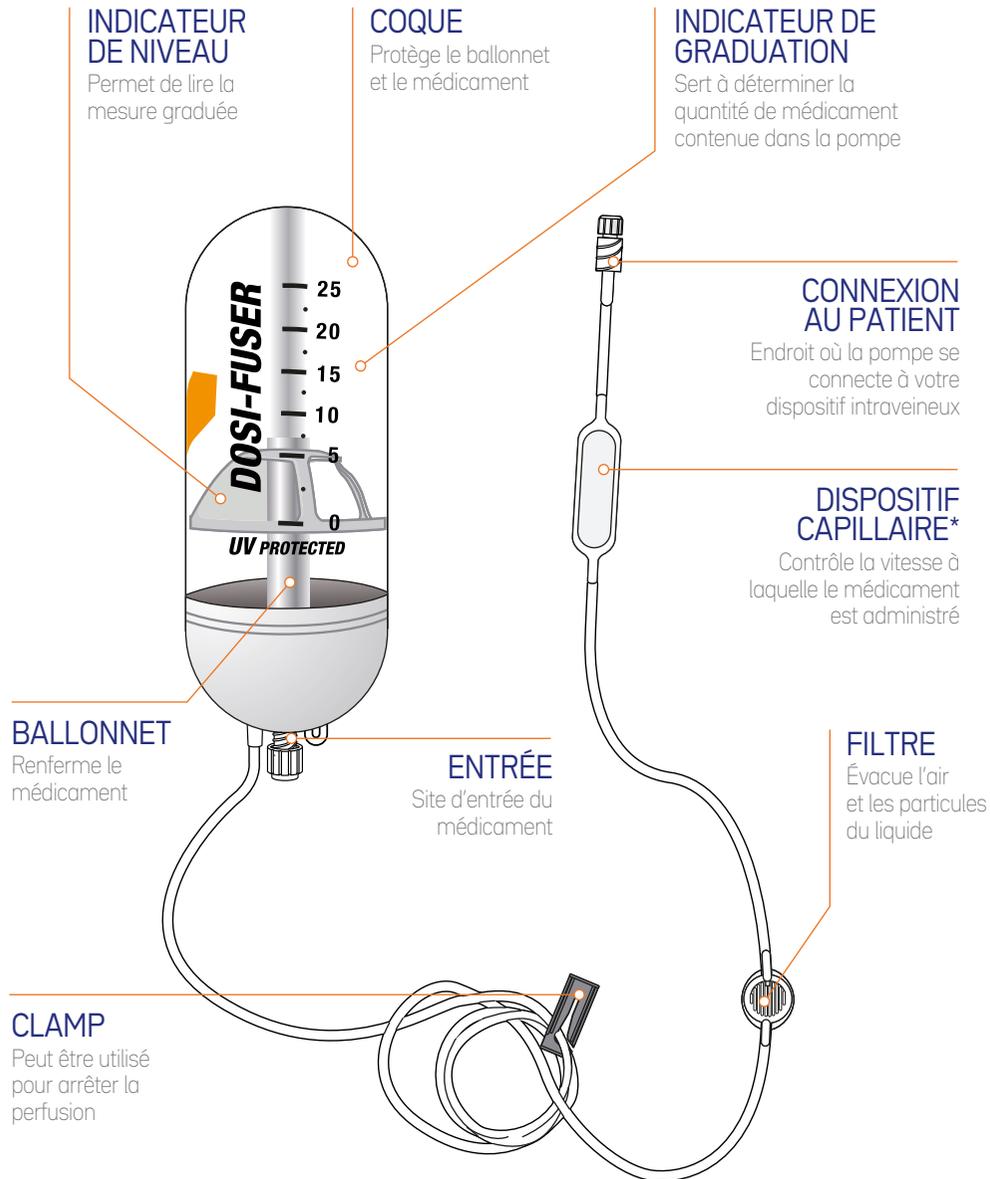

*Certains modèles sont équipés d'un régulateur en remplacement du dispositif capillaire.

Directives générales

Sommeil

- ▶ Placez votre DOSI-FUSER® là où vous le souhaitez, au même niveau que vous.
- ▶ Ne le suspendez pas à un montant du lit ou à une potence pour intraveineuse.
- ▶ Le dispositif ne doit pas être placé au sol.

Douche / bain

- ▶ Pendant la douche ou le bain, protégez votre DOSI-FUSER® des sources d'eau directes.
- ▶ Veillez en particulier à protéger l'orifice du filtre de l'eau sous peine d'obstruer la membrane d'évacuation de l'air.

Température

- ▶ N'exposez pas le diffuseur à des températures extrêmes.
- ▶ Protégez le réservoir du froid en le portant sous vos vêtements.
- ▶ Protégez-le de la chaleur directe.
- ▶ Conservez le dispositif capillaire en contact avec la peau à 32 °C [89,6 °F].

Nettoyage

- ▶ Le dispositif capillaire n'a pas besoin d'être lavé, mais si vous le faites, utilisez uniquement de l'eau.
- ▶ N'utilisez pas d'alcool ou d'autres solvants à cette fin.

Activité physique

- ▶ Vous pouvez pratiquer une activité physique avec le DOSI-FUSER®, mais vous devez tenir compte des éléments suivants:
 - ▶ La taille du contenant.
 - ▶ La température.
 - ▶ Ne mouillez pas le filtre sur la ligne.
 - ▶ Ne faites pas tomber le produit.

Voyage

- ▶ Vous pouvez emmener le DOSI-FUSER® avec vous dans l'avion.