



# Resolução de problemas


- ▶ **Se a medicação não estiver a fluir**, certifique-se de que a linha IV não está bloqueada e que o tubo não está dobrado.
- ▶ **Se notar líquido dentro da cápsula mas fora do balão**, contacte o seu profissional de saúde.
- ▶ **Se alguma peça da bomba estiver avariada**, bloqueie a linha segundo as instruções e contacte o seu profissional de saúde.
- ▶ **Se houver fuga de líquido para a sua pele**, lave imediatamente com água e contacte o seu profissional de saúde.

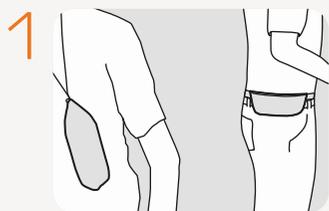


1 Transporte a cápsula junto ao corpo.

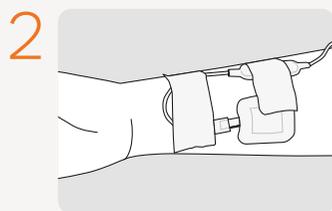

2 Mantenha o dispositivo capilar em contato com a pele.

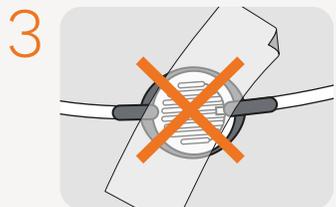

3 Não tape o filtro. Mantenha-o seco e limpo.

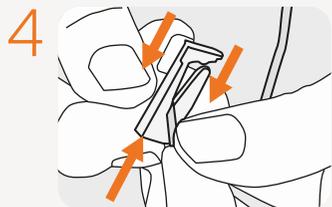

4 Para parar a infusão, bloqueie a linha fazendo o tubo deslizar para dentro da parte estreita do grampo.

PL-2590003971-1v02.01-2024

**leventon**  
a werfen company



[dosi-fuser.com](http://dosi-fuser.com)

# DOSI-FUSER®

## Guia doméstico do paciente




- ▶ O seu enfermeiro irá iniciar a infusão e dizer-lhe quanto tempo vai demorar para a medicação entrar na sua corrente sanguínea. A medicação é introduzida lentamente.
- ▶ Vai notar o balão a esvaziar e a ficar mais pequeno à medida que a infusão progride.
- ▶ Vai ver o indicador de nível de plástico branco a descer gradualmente ao longo da escala à medida que o balão se esvazia.
- ▶ No fim da infusão, o indicador de nível de plástico branco estará no 0 [zero] na escala graduada azul.

## Como funciona o DOSI-FUSER®

- 1 A bomba infusora possui uma cápsula rígida com um balão no seu interior, onde se encontra a medicação que lhe foi prescrita. A bomba deve ser usada entre a parte superior do tronco e a cintura, segundo as instruções do seu profissional de saúde.
- 2 A cápsula está ligada a uma linha de infusão que possui um grampo, um filtro e um dispositivo capilar. O dispositivo capilar controla o fluxo de infusão e tem de estar sempre preso à sua pele segundo o método e no local indicados pelo seu enfermeiro. A pressão do balão insuflado no interior da bomba introduz a medicação no seu organismo a um ritmo constante.

# DESCRIÇÃO DAS PEÇAS INDIVIDUAIS

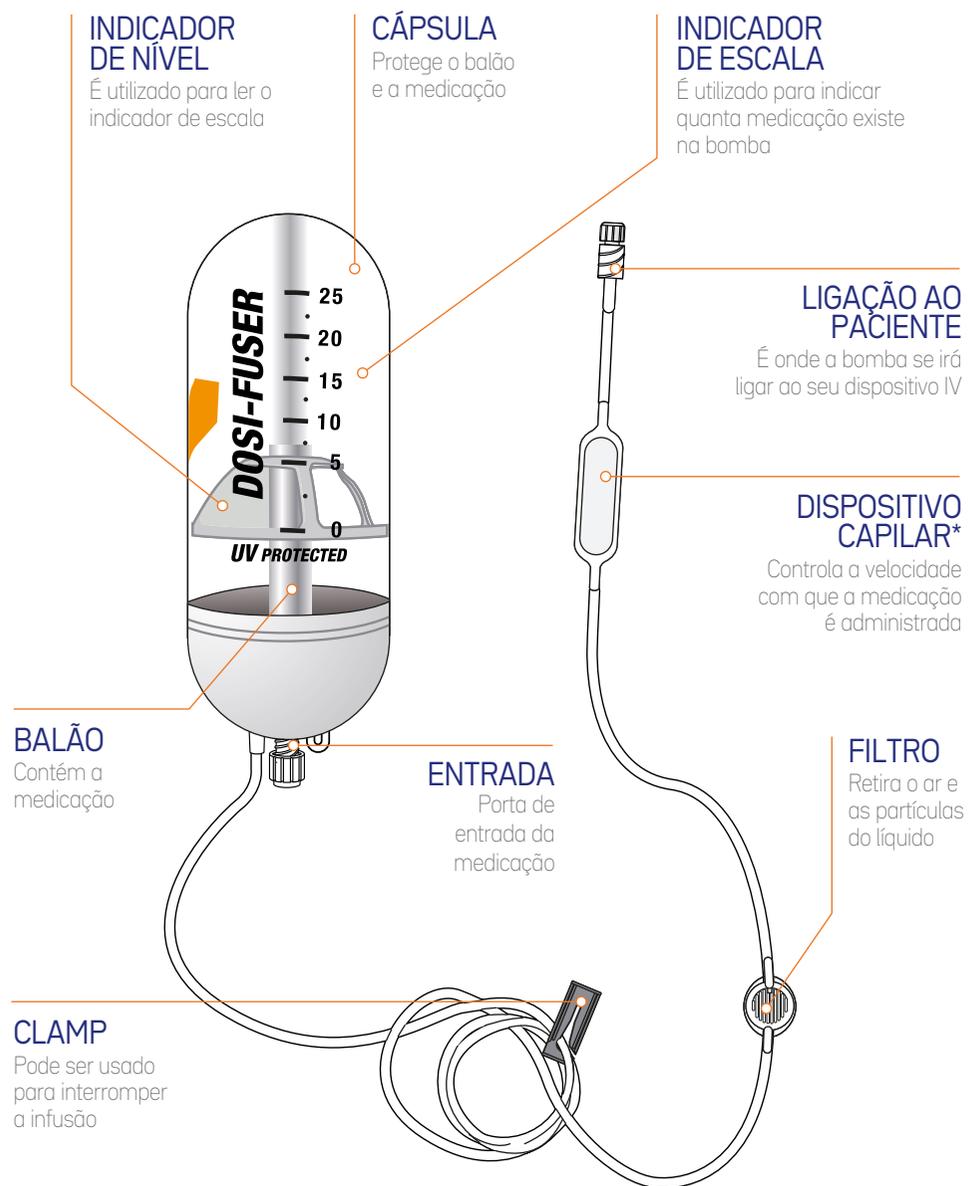

\*Alguns modelos incorporam um tubo restritor em vez de um dispositivo capilar.

# Orientações gerais

## Dormir

- ▶ Coloque o DOSI-FUSER® num local ao seu nível.
- ▶ Não pendure num poste da cama ou suporte IV.
- ▶ Não o deixe no chão.

## Lavagem

- ▶ O dispositivo capilar não necessita de lavagem, mas se o lavar, utilize apenas água.
- ▶ Não utilize álcool ou outros solventes para esta finalidade.

## Duche/Banho

- ▶ Quando tomar duche/banho, proteja o seu DOSI-FUSER® de jatos de água diretos.
- ▶ Em particular, certifique-se de que o orifício do filtro que se encontra na linha está protegido da água, pois pode bloquear a membrana de eliminação de ar.

## Exercício

- ▶ Pode praticar exercício com o DOSI-FUSER®, contudo leve em consideração o seguinte:
  - ▶ A altura do reservatório.
  - ▶ A temperatura.
  - ▶ Não molhe o filtro da linha.
  - ▶ Não deixe a bomba cair.

## Temperatura

- ▶ Não exponha a cápsula a temperaturas extremas.
- ▶ Proteja a cápsula das temperaturas frias transportando-a por baixo da roupa.
- ▶ Proteja-a do calor direto.
- ▶ Mantenha o dispositivo capilar em contacto com a pele a 32° C [89,6 °F].

## Viajar

- ▶ Pode viajar de avião com o DOSI-FUSER®.